



Mix2Vial® – Easy2Use

Anwendungsanleitung

Mix2Vial®

5. Das Wasser läuft nun in die Produktflasche. Vorsichtiges Schwenken hilft, das Pulver aufzulösen. Nicht schütteln!



6. Ist das Pulver gelöst, schrauben Sie einfach die Wasserflasche ab.



7. Ihre Spritze passt in die Aufnahme des klaren Mix2Vial®-Endes – so können Sie die Lösung problemlos aufziehen. Ein separater Filter ist nicht nötig, weil im Mix2Vial®-Set ein Filter integriert ist.*



Noch ein Wort zum Schluss:

Bitte achten Sie immer darauf, unter hygienischen Bedingungen zu arbeiten (Hände waschen, saubere Unterlage etc.).

* Sie finden eine Anwendungsbeschreibung für Mix2Vial® auch in der Packungsbeilage des betreffenden Medikaments.

Anwendungsanleitung



1. Arbeiten Sie auf einer sauberen und festen Unterlage, am besten auf einem Tisch. Ziehen Sie zuerst nur den Verschluss von der Mix2Vial®-Packung ab.

2. Jetzt stellen Sie die Wasserflasche auf den **Tisch** und stecken das Mix2Vial® komplett mit der Verpackung **senkrecht** auf die Flasche. Das blaue „Wasser“-Ende rastet auf der Wasserflasche ein.

3. Entfernen Sie jetzt die Mix2Vial®-Verpackung.

4. Stellen Sie die Produktflasche auf den **Tisch**. Drücken Sie das Mix2Vial®-Set zusammen mit der Wasserflasche **senkrecht** auf die bereitgestellte Produktflasche. Das klare Ende muss auf der Produktflasche einrasten.

Mix2Vial® – Das nadellose Überleitsystem für die Faktorenkonzentrate von CSL Behring

- Leichte, schnelle Handhabung
- Verletzungsgefahr durch Nadelstiche bei sachgemäßer Anwendung ausgeschlossen
- Integrierter Filter
- Freie Spritzenwahl



Deutschland
 CSL Behring GmbH
 Philipp-Reis-Straße 2
 65795 Hattersheim
 Telefon +49 69 305 84437
 Fax +49 69 305 17129
www.cslbehring.de

Schweiz
 CSL Behring AG
 Wankdorfstrasse 10
 3000 Bern 22
 Gratis-Telefon 0800 55 14 15
 Telefon +41 31 344 4444
 Fax +41 31 344 2600
www.cslbehring.ch

Österreich
 CSL Behring GmbH
 Altmannsdorfer Straße 104
 1121 Wien
 Telefon +43 1 80101 2464
 Fax +43 1 80101 2810
www.cslbehring.at